

StrataXRT[®]

para a prevenção e tratamento
da dermatite de radiação

O curativo inovador,
formador de filme,
que apoiará sua jornada
de radioterapia.

Dr.Reddy's 



O que é radiodermite?

Você e o seu médico decidiram iniciar a radioterapia. A radioterapia usa altas doses de radiação para destruir células cancerígenas de crescimento rápido (ex.: para reduzir tumores).

A radiação que destrói as células cancerígenas também fere as células saudáveis da pele nas proximidades, como a camada basal de crescimento rápido da pele. É por isso que você pode sentir alguns efeitos colaterais na pele, chamados radiodermite.

Este folheto ajudará a entender e gerenciar esses efeitos colaterais antes que apareçam.

- A radiodermite é um efeito colateral comum que ocorre durante o tratamento com radioterapia.
- A radiodermite é diferente de queimaduras. O dano acontece nas camadas profundas da pele.
- Você verá danos na pele aproximadamente 10-14 dias após a primeira fração de radiação, correspondendo ao tempo que leva para as células da pele danificadas migrarem até a superfície da pele.¹
- Se as novas células forem produzidas mais rápido do que as células antigas descamarem, a sua pele ficará seca e descascando (descamação seca).¹
- À medida que a radioterapia continua, a sua pele pode não produzir células novas em número suficiente para substituir as antigas e, portanto, a camada externa da pele pode rachar e soltar líquido (descamação úmida).²
- A intensidade das reações cutâneas pode aumentar durante 2 semanas após a conclusão da radioterapia, à medida que as novas células cutâneas substituem as que foram danificadas.²

Proteja e cuide da sua pele

- Sua roupa deve cobrir a área que está sendo tratada quando estiver ao ar livre.
- Use roupas largas.
- Escolha roupas e lençóis feitos de materiais macios.
- Evite exposição direta ao sol e sempre use filtro solar para oferecer proteção máxima para a sua pele.
- Use sabonetes e produtos de higiene pessoal neutros e não perfumados.
- Tome banho com água morna, não com água quente.
- Seque suavemente a pele após o banho, dando leves batidinhas na pele.
- Evite nadar em água com cloro, que pode ressecar a pele.
- Não esfregue as marcas que o radioterapeuta fizer na pele. Elas mostram como posicionar a aplicação de radiação.
- Não coloque nada que seja muito quente ou frio na área que recebe a radiação.
- Use um barbeador elétrico se o seu médico ou enfermeira disser que você pode aparar os pelos.
- Não faça a barba com "método úmido" e nem use produtos para a remoção de pelos.

StrataXRT[®]

para a prevenção e tratamento
da dermatite de radiação



Verifique com o seu médico ou enfermeira antes de colocar qualquer produto em sua pele.

Lembre-se de que produtos comuns de cuidados com a pele, cosméticos e desodorantes podem ser contraindicados ou não adequados para uso em regiões com alterações cutâneas por radiodermite.

Informe seu médico ou enfermeiro se sua pele permanecer úmida ou se apresentar feridas.

StrataXRT® - seu apoio ao longo da jornada da radioterapia



StrataXRT® é um curativo inovador, formador de filme, projetado especificamente para a prevenção e o tratamento da radiodermite.

- StrataXRT® foi desenvolvido para se espalhar facilmente usando uma pequena quantidade de produto.

- StrataXRT® é bacteriostático, permeável a gases, à prova d'água e inerte.

StrataXRT® seca para formar uma camada fina, flexível e protetora na área da pele afetada pela radiodermite.

- Continue com o frágil manto ácido da pele, porque StrataXRT® não tem valor de pH mensurável.

- Minimize a perda transepidermica de água, preservando a hidratação natural da pele.

- Tenha maior conforto.

- Tenha menor resposta inflamatória aguda da pele.

- Tenha alívio para alterações inflamatórias de baixo grau da pele como secura, coceira e descamação.

- Fique protegida contra traumas e fricção.

- Crie um ambiente úmido de cicatrização da ferida nas fases em que a pele está rompida.

- Tenha menor progressão das reações cutâneas durante a radioterapia.

Dicas para uso do StrataXRT®

StrataXRT® pode manchar roupas se não estiver completamente seco. A lavagem normal não removerá o produto de suas roupas. Se ocorrerem manchas, pode ser possível removê-las sem danificar o tecido usando lavagem a seco.

StrataXRT® também pode ser usado em conjunto com outros tratamentos para melhorar os resultados gerais. StrataXRT® pode ser usado com ou sem curativo protetor secundário.

StrataXRT® pode ser aplicado com mais frequência para aliviar a coceira ou outros sintomas.

Quanto StrataXRT® é necessário?

O gel StrataXRT® é uma formulação exclusiva que requer substancialmente menos produto por aplicação do que cremes hidratantes típicos ou pomadas de barreira, pois ele seca formando um curativo flexível.

Um tubo de 20 g é suficiente para tratar uma área de 12 cm × 15 cm 2 vezes por dia por mais de 30 dias.


Um tubo de 50 g é suficiente para tratar uma área de 12 cm × 15 cm 2 vezes por dia por mais de 75 dias.

O StrataXRT® não penetra na pele: ele seca e forma uma camada muito fina com espessura menor que a de um pedaço de papel.


Como aplicar o StrataXRT®

StrataXRT® pode manchar a roupa se não estiver completamente seco. A lavagem normal não removerá o produto de suas roupas. Se ocorrerem manchas, deve ser possível removê-las sem danificar o tecido usando lavagem a seco.


StrataXRT® também pode ser usado em conjunto com outros tratamentos para melhorar os resultados gerais. StrataXRT® pode ser usado com ou sem curativo protetor secundário.

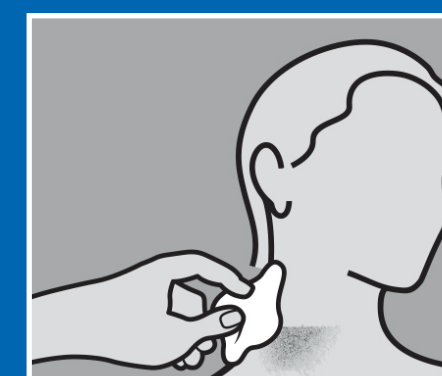


1. Confirme que a pele afetada ou a ferida superficial esteja limpa e seca. Seque suavemente o máximo possível de exsudato ou fluido da ferida da área antes da aplicação do gel.

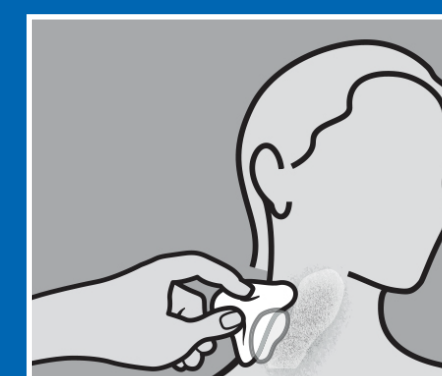

3. Se demorar mais para secar, você provavelmente aplicou demais. Retire com cuidado o excesso com gaze e deixe o processo de secagem continuar.

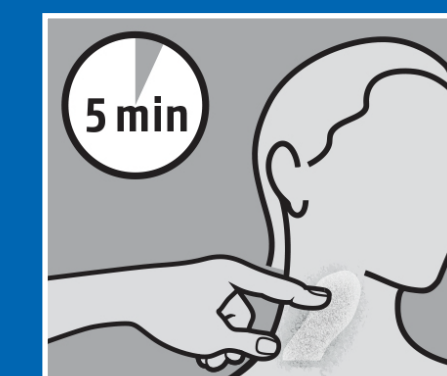

2. Aplique uma camada muito fina de StrataXRT® diretamente na área afetada e deixe o gel secar.

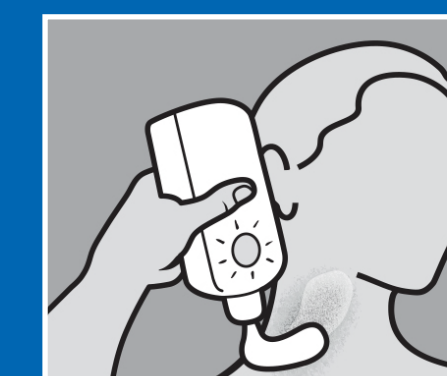

4. Depois de seco, StrataXRT® pode ser coberto por protetor solar, cosméticos e roupas.

Duração recomendada do tratamento

StrataXRT® é recomendado após a dose de radiação inicial e deve continuar a ser aplicado por um período mínimo de 60-90 dias (24 horas por dia/7 dias por semana/2 vezes ao dia) após a radioterapia, ou até que nenhuma melhora adicional seja observada. Para radiodermite crônica, o uso contínuo é recomendado até que nenhuma melhora adicional seja observada.

StrataXRT® é recomendado para uso desde a 1ª sessão de radioterapia.

StrataXRT® é um curativo inovador, formador de filme, projetado especificamente para a prevenção e o tratamento da radiodermite.

StrataXRT® é usado para aliviar alterações inflamatórias de baixo grau, como pele seca com coceira, descamação e irritação.

Onde encontrar?



0800 778 18 88
08000 102030



0800 017 0144
www.oncoprod.com.br



AlôPanvel: 08006429001
www.panvel.com

StrataXRT®

para a prevenção e tratamento da dermatite de radiação



CE Dispositivo médico Classe IIa
Listado pela FDA / registrado pela TGA

Aviso: exclusivamente para uso externo. StrataXRT® não deve ser colocado em contato com os olhos. StrataXRT® não deve ser aplicado sobre medicamentos tópicos, a menos que aconselhado por seu médico. StrataXRT® pode manchar a roupa se não estiver completamente seco. Se ocorrerem manchas, deve ser possível removê-las sem danificar o tecido usando lavagem a seco. Se a sua radiodermite mostrar sinais de infecção ou falha após 7 dias depois da aplicação inicial do produto, consulte seu médico. Não indicado para feridas altamente exsudativas, feridas em túnel ou queimaduras de terceiro grau. Mantenha fora do alcance das crianças. Não use este produto após a data de validade impressa no tubo. A data de validade (EXP) não muda depois da abertura do tubo. Não utilizar se o tubo estiver danificado. Para o armazenamento correto, feche novamente o tubo firmemente com a tampa. **Estéril até ser aberto. Ingredientes:** polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilmetilsilicones.

Referências: 1. Porock, Kristjanson. Eur J Cancer Care (Engl). 1999;8(3):143-153 2. Kedge E. Radiography. 2009;15(3):247-257.



Dr.Reddy's

Av. Guido Caloi, 1.985 - Galpão 11
Jd. São Luis - CEP: 05802-140
São Paulo/SP - Brasil
SAC 0800 87 89 055
carebrasil@drreddys.com

Visite nosso novo site e saiba mais sobre o StrataXRT®.
www.drreddys.com.br



Stratpharma
Switzerland

Fabricado por: Stratpharma AG
Aeschenvorstadt 57 - CH-4051
Basel - Suíça

Visite o site do fabricante e saiba mais sobre o o StrataXRT® e a radiodermite:
www.strataxrt.com

Material destinado ao público leigo.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

DRL 2200 - Março/2020

SX-ML-019-3-0418